

**Istruzioni d'uso e manutenzione**  
**Applicazione web LeggoMEGLIO**

## **ATTENZIONE**

Prima di utilizzare il software è necessario leggere integralmente il libretto di istruzioni LeggoMEGLIO in tutte le eventuali istruzioni allegate.

## **NOTIZIE GENERALI**

Il seguente manuale e' composto dalle seguenti parti:

SOMMARIO

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>NOTIZIE GENERALI</b>                                               | <b>2</b>  |
| SICUREZZA                                                             | 4         |
| Simbolo di avvertimento                                               | 4         |
| Avvertenze                                                            | 4         |
| DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE                                        | 5         |
| CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE                                         | 5         |
| CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO   | 5         |
| CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRE SPECIFICHE | 5         |
| GARANZIA                                                              | 5         |
| CARATTERISTICHE TECNICHE                                              | 5         |
| IMPORTANTE                                                            | 6         |
| ISTRUZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE                               | 8         |
| Localizzazione del software                                           | 8         |
| Installazione                                                         | 8         |
| <b>Impostazioni e istruzioni d'uso:</b>                               | <b>8</b>  |
| <b>5. MANTENIMENTO E MANUTENZIONE</b>                                 | <b>17</b> |
| REGOLAZIONI SOFTWARE                                                  | 18        |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATA                                              | 18        |
| VERIFICHE FUNZIONALI E DI SICUREZZA                                   | 19        |
| REGOLAZIONI                                                           | 20        |
| MANUTENZIONE PROGRAMMATA                                              | 20        |
| VERIFICHE FUNZIONALI E DI SICUREZZA                                   | 20        |
| <b>SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO A FINE VITA</b>                        | <b>20</b> |
| ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'ITALIA                                   | 21        |
| <b>SCHEDA SEGNALAZIONE INCIDENTI ALLE PERSONE</b>                     | <b>22</b> |

**SICUREZZA**

### **Simbolo di avvertimento**



**ATTENZIONE:** Indica una situazione di pericolo che può comportare danni materiali o lesioni da lievi a moderate.

**PERICOLO:** Indica una situazione di pericolo che può comportare una situazione direttamente connessa a lesioni gravi o letali

### **Avvertenze**

**PERICOLO:** Per evitare il rischio di errata valutazione o shock elettrico seguire le istruzioni di seguito riportate.

**PERICOLO:** Il software deve essere installato in ambienti con impianti elettrici conformi alla normativa vigente nel proprio paese.

**PERICOLO:** Controllare sempre che il software sia in buone condizioni.

**ATTENZIONE:** Non usare software se una sua parte è difettosa o logorata. In tal caso richiedere l'intervento di tecnici autorizzati BEON SOLUTIONS Srl.

**PERICOLO:** Non modificare questo software senza l'autorizzazione del fabbricante, l'impiego di accessori non approvati e/o modifiche non autorizzate possono costituire imminenti pericoli di lesione a persone nonché danni materiali.

**ATTENZIONE:** Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite dopo aver spento il software.

## **DEFINIZIONE DELLA DESTINAZIONE**

LeggoMEGLIO è un software per il miglioramento della lettura che agisce attraverso un insieme di attività proposte su supporto informatico di un dispositivo Android e in alcuni casi agisce collegandosi ad un sensore di movimento standard presente nel mercato.

## **CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE**

Il software potrà essere utilizzato su, tablet, telefoni o pc che presentino le caratteristiche minime di sicurezza. Ambiente di installazione e' Android 6.8 o successivi. Il sensore si collega al software sotto queste caratteristiche.

## **CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL TRASPORTO E L'IMMAGAZZINAMENTO**

Il software e' conservato in ambienti cloud dedicati alla fruizione e installazione dello stesso e al rinnovo dello stesso secondo le policy richieste.

## **CONDIZIONI AMBIENTALI AMMESSE PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRE SPECIFICHE**

Il software LeggoMEGLIO deve essere installato su device con performance minime di funzionamento tale da permettere la comunicazione tra il sistema operativo e le informazioni provenienti da sensori eventualmente richiesti dal software.

## **GARANZIA**

Il software è coperto da un periodo di garanzia di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di installazione presso l'acquirente. La garanzia si intende valida solo se il cliente ha acquistato la licenza d'uso del mese in oggetto di garanzia.

La garanzia si applica all'acquirente e al prodotto specificato nel Verbale di Installazione e Collaudo e copre tutti gli interventi di natura elettrica riferiti al prodotto in questione.

La garanzia opererà dopo che la parte acquirente avrà compilato e inviato a beon Solutions srl comunicazione di installazione via email al seguente indirizzo: [info@beonsolutions.it](mailto:info@beonsolutions.it) in caso affermativo fa fede la data di acquisto.

## **BEON SOLUTIONS S.r.l.**

**Via Bertoneria, 16/D, Zero Branco, 31059 (TV) Italia**

**e-mail: [beonsolutions@gmail.com](mailto:beonsolutions@gmail.com) - PEC: [beonsolutions@pec.it](mailto:beonsolutions@pec.it)**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

*Table 1.*

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                | Software e sensore di movimento per svolgere esercizi di miglioramento della velocità di lettura. |
| Fabbricato da          | BEON SOLUTIONS SRL<br>Via Bertoneria, 16/D Italia                                                 |
| Classe                 | Dispositivo elettrico                                                                             |
| Parti applicate Tipo   |                  |
| Tempi di funzionamento | Apparecchiatura prevista per uso continuo                                                         |

## IMPORTANTE

BEON SOLUTIONS declina ogni responsabilità agli effetti della sicurezza e dell'affidabilità se l'installazione non viene svolta su dispositivi certificati dall'azienda stessa nella lista dei dispositivi compatibili. Informazioni aggiornate nel sito web alla pagina [www.beonsolutions.it/LeggoMEGLIO.it](http://www.beonsolutions.it/LeggoMEGLIO.it)

## SCARICO RESPONSABILITA'

*Iniziando il programma di lavoro in autosomministrazione LeggoMEGLIO, il sottoscritto dichiara:*

- *Di assumersi ogni responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati da altri (e/o a cose) conseguenti all'esecuzione più o meno corretta dei vari programmi di allenamento, liberando in questo modo Beon Solutions srl da qualsivoglia tipo di responsabilità;*
- *Di eseguire gli esercizi in un ambiente sicuro e supervisionato;*
- *Di consultare immediatamente un Dottore qualora dovessero insorgere fastidi, dolori e/o sensazioni spiacevoli durante l'esecuzione del programma LeggoMEGLIO.*
- *Di utilizzare da parte di adulti e in caso di minori solo su supervisione del genitore il quale si prende la responsabilità e supervisiona ogni parte del programma.*

## DATI DI TARGA

Sulle schermate principali del software sono riportati i dati di fabbrica e i dati di etichetta nonché il manuale d'uso e di istruzione.

## FOTO ETICHETTA

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | BeOn Solution Srl<br>Via Bertoneria 16/D<br>31059 Zero Branco (TV) Italia           |
|  |  |
|  | Paaxxxxxx                                                                           |
|  | gg mm aa                                                                            |

## ISTRUZIONI TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE

### Localizzazione del software

Il software si trova nella cartella cloud di Google Play e si trova andando in ricerca e scrivendo LeggoMEGLIO.

### Installazione


### Impostazioni e istruzioni d'uso:

Questa piattaforma come la precedente riceve i programmi sopra indicati e li raggruppa per l'uso. La piattaforma personal si usa su base Android e riceve solamente i moduli sopra indicati e li fornisce consecutivamente uno dopo l'altro.

*Per ottimizzare l'esperienza utente si consiglia di installare un applicativo che permetta la lettura dei codici QR.*

*LeggoMEGLIO e' una app che si scarica dal Playstore di Google al seguente indirizzo*  
<https://play.google.com/>



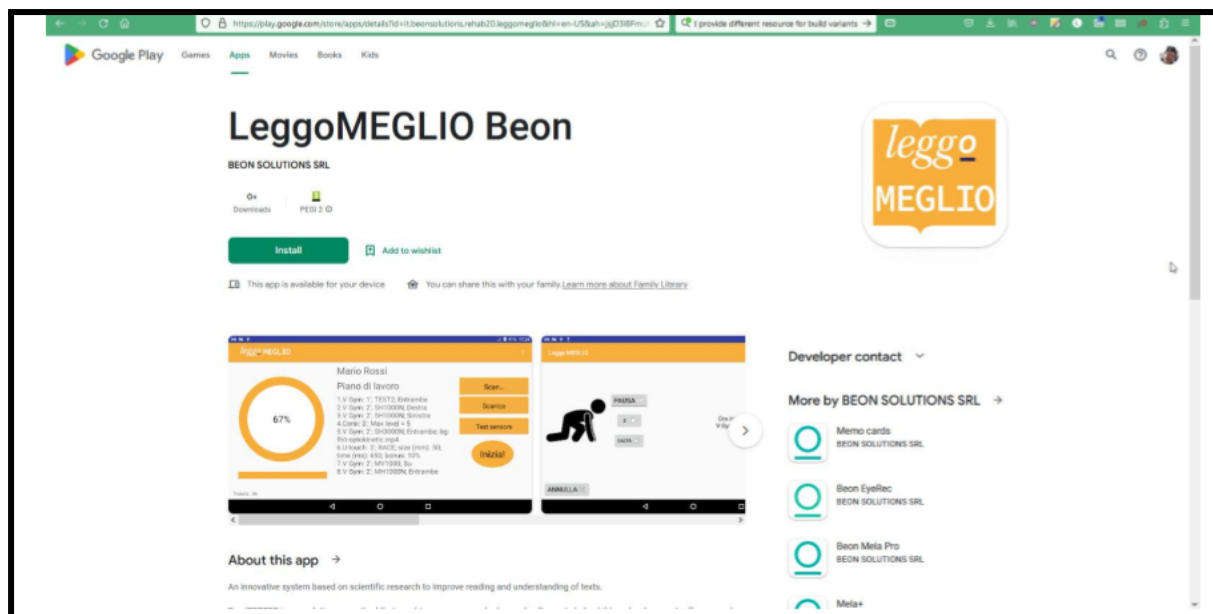

## LeggoMEGLIO

- A questo punto sarà necessario inserire i codici che troverete dentro al vostro LeggoMEGLIO per poter attivare il software per il periodo indicato.



**leggo MEGLIO**

**Attivazione App LeggoMEGLIO**

Alla prima attivazione sul vostro dispositivo


**USER ID 11122333:**

**PASSWORDXXXXXXX:**

Mantenere le credenziali in caso di rinnovo del prodotto

Per rinnovo seguire il link all'interno dell'app

- Una volta immesso il codice vi verrà chiesto il codice utente che trovate all'interno della vostra scatola LeggoMEGLIO.

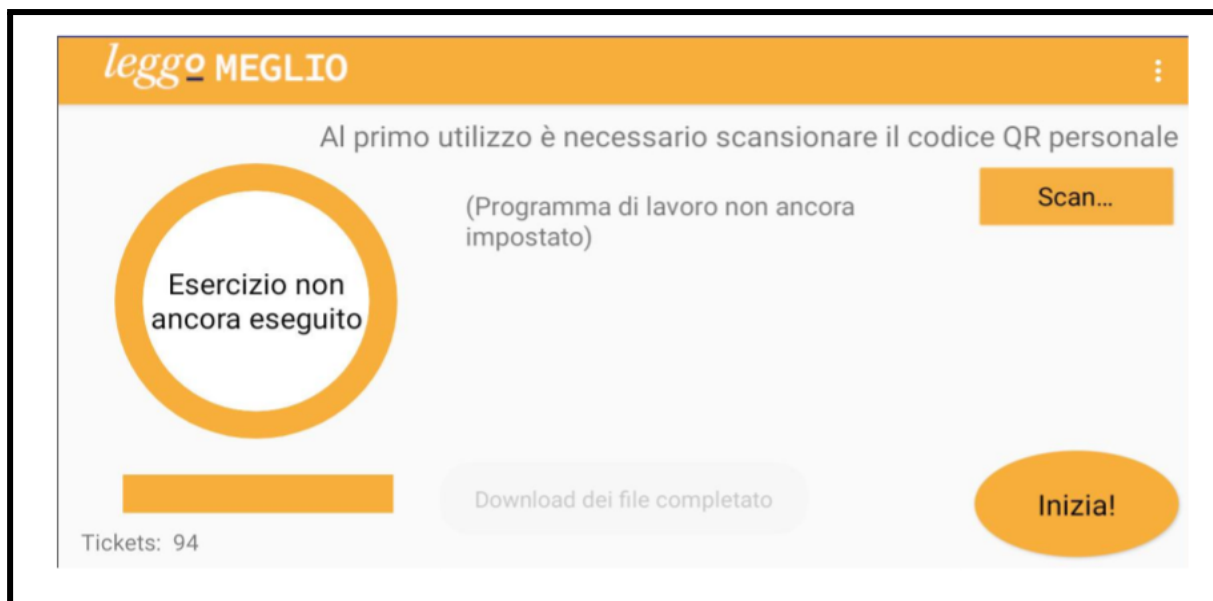


- Una volta immesso il codice utente, selezionare i 3 puntini in alto a destra, dopodichè cliccare 'Setup' nel menù a tendina che apparirà.



**Collegamento del sensore:**

*All'interno del packaging trovate un micro sensore. Al fine di eseguire con successo gli esercizi è necessario connetterlo al vostro terminale.*


- *In primo luogo è necessario attivare il Bluetooth del dispositivo dalla schermata a tendina 'Impostazioni'.*
- *Successivamente è necessario accedere all'applicazione quindi selezionare i due puntini in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'.*

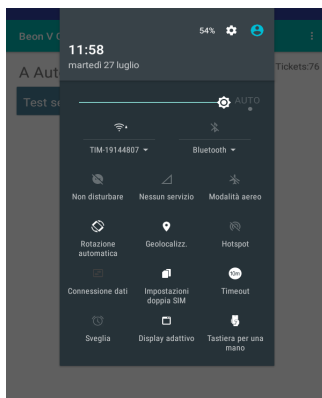

- Una volta selezionata la voce 'Impostazioni' apparirà la schermata sottostante, a questo punto, selezionare il pulsante 'Scan' che si trova in basso a destra dello schermo.



- A questo punto, verrete rimandati nella pagina qui sotto allegata. Selezionate quindi il LeggoMEGLIO sensore o altro sensore compatibile che apparirà. Se non appare nessun risultato:
- in prima battuta verificare la corretta attivazione del bluetooth del vostro dispositivo,
- in seconda battuta mettere sotto carica il sensore a vostra disposizione.

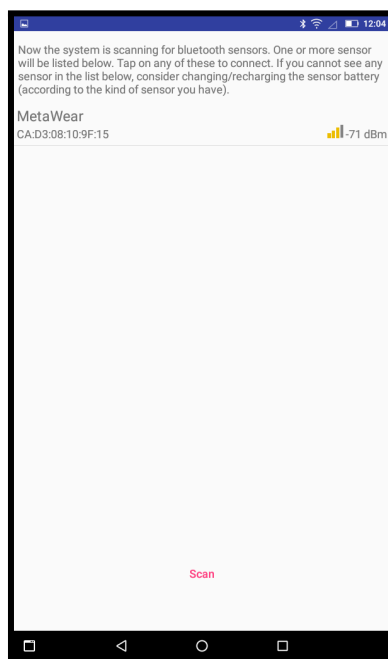

## LeggoMEGLIO

- Completata tale procedura dare l'OK in basso a destra e si verrà rimbalzati nella pagina iniziale. Eseguire dunque un 'Test Sensore' mediante l'apposito tasto e attendere il messaggio di avvenuta connessione.



In caso di necessità contatta l'assistenza alla seguente email: [beonsolutions@gmail.com](mailto:beonsolutions@gmail.com)

L'assistenza tecnica risponderà a problemi tecnici di installazione nel caso questi passaggi non siano correttamente eseguiti causa problemi tecnici..

## PROCEDERE CON GLI ESERCIZI

Una volta completate queste fasi il software è pronto per procedere con gli esercizi. Gli esercizi sono forniti da un algoritmo software chiamato LeggoMEGLIO a seguito dell'inserimento dei dati di partenza o a seguito delle performance su esercizi presenti nel software.

Un algoritmo fornirà l'algoritmo successivi di allenamento. Potrebbero essere richiesti dati supplementari o potrebbe essere previsto aiuto di un professionista per inserire i dati e chiedere un nuovo algoritmo al sistema più complesso.

### PRIMI GLI ESERCIZI

Per selezionare uno dei piani di lavoro proposti è necessario schiacciare il pulsante SCAN nella pagina iniziale dell'applicazione LeggoMEGLIO, quindi inquadrare uno dei QR riportato nei piani di lavoro, nel documento piani di lavoro all'interno del pacchetto LeggoMEGLIO.

Si consiglia di eseguire una LETTURA STANDARD PER LA PROPRIA ETA' e inserire i dati nell'algoritmo in modo da avere la scelta del miglior protocollo possibile.

INSERIRE TUTTI QUESTI DATI NEL SISTEMA INFORMATIVO LEGGOMEGLIO.

CLICCARE SU SCARICA E TROVERETE I PIANI DI LAVORO IDONEI INSERITI, PROCEDERE AL PIANO DI LAVORO FINO ALLA REGOLA SOTTO INDICATA IN RELAZIONE AL RISULTATO FINALE.

**Importante:** Fermarsi in caso di dolore o fastidio.











| <b>Risultato</b>       | <b>Consiglio su come proseguire</b>                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Compreso tra 0 e 40%   | Scendere di un livello                                                        |
| Compreso tra 40 e 80%  | Rimanere a questo livello fino a raggiungimento dell'80% di risposte corrette |
| Compreso tra 80 e 100% | Aumentare di un livello di difficoltà                                         |

## PIANI DI LAVORO

All'interno del packaging trovate un foglio con i piani di lavoro standard che potete applicare, si consiglia di rivolgersi ad una rete di formatori per la scelta del miglior piano e per la eventuale formazione sugli esercizi sul miglior svolgimento.

### Piani di lavoro

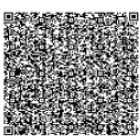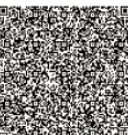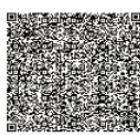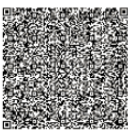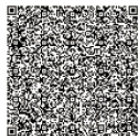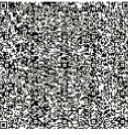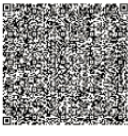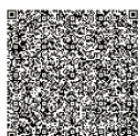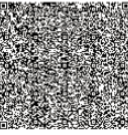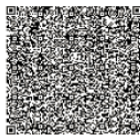

|                                                                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Piano di lavoro 2A</b></p>    | <p><b>Piano di lavoro 2B</b></p>    |
| <p><b>Piano di lavoro 2C</b></p>    | <p><b>Piano di lavoro 2D</b></p>    |
| <p><b>Piano di lavoro 3A</b></p>   | <p><b>Piano di lavoro 3B</b></p>   |
| <p><b>Piano di lavoro 3C</b></p>  | <p><b>Piano di lavoro 4D</b></p>  |
| <p><b>Piano di lavoro 4A</b></p>  | <p><b>Piano di lavoro 4B</b></p>  |
| <p><b>Piano di lavoro 5A</b></p>  | <p><b>Piano di lavoro 5B</b></p>  |
| <p><b>Piano di lavoro 6A</b></p>  | <p><b>Piano di lavoro 6B</b></p>  |

Altre informazioni al sito

<https://www.beonsolutions.it/manuale-leggomeglia-italiano/>





## 5. MANTENIMENTO E MANUTENZIONE

Vengono descritte le operazioni, che raccomandiamo vivamente di effettuare con le modalità e le periodicità indicate, per garantire la massima durata ed efficienza nel tempo alla vostra apparecchiatura.

Nei seguenti paragrafi sono elencate le varie attività di manutenzione, con la relativa frequenza, l'indicazione dell'addetto all'esecuzione e gli eventuali dettagli di riferimento.

Le attività sono classificate in:

- ☐ pulizia/disinfezione,

Prendono in considerazione tutte le configurazioni utilizzando i vari accessori disponibili..

## REGOLAZIONI SOFTWARE

| REGOLAZIONI su                                          |                                     |                      |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| Attività                                                | Frequenza                           | Chi la effettua?     | Note/riferimenti |
| Spegnere e riaccendere il telefono                      | Fine sessione giornaliera di lavoro | Operatore addestrato |                  |
| Spegnere e riaccendere il sensore collegato al telefono | Tra un paziente e il successivo     | Operatore addestrato |                  |

## MANUTENZIONE PROGRAMMATA

| MANUTENZIONE PROGRAMMATA                                        |             |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| Attività                                                        | Frequenza   | Chi la effettua?      | Note/riferimenti |
| Verifica del collegamento tra il sensore e il sistema operativo | Settimanale | L'azienda produttrice |                  |
| Verifiche funzionali generali                                   | Mensile     | Tecnico autorizzato   |                  |
|                                                                 |             |                       |                  |

## VERIFICHE FUNZIONALI E DI SICUREZZA

Per garantire la sicurezza operativa e funzionale del Set up F, è necessario sottoporre annualmente ad un intervento di manutenzione ordinaria, da eseguirsi a cura di un tecnico autorizzato BEON SOLUTIONS.

Sono di seguito descritte alcune operazioni di manutenzione straordinaria; raccomandiamo che tutte vengano eseguite da tecnici autorizzati BEON SOLUTIONS.

| MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                            |                   |                     |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Attività                                                              | Frequenza         | Chi la effettua ?   | Note/riferimenti                                                       |
| Interventi per qualsiasi malfunzionamento, guasto o fermo apparecchio | Quando necessario | Tecnico autorizzato | Fare riferimento alla documentazione tecnica di recovery del software. |

Le prove e verifiche periodiche prevedono dei controlli visivi; i risultati ed i valori misurati sono necessariamente registrati su apposita modulistica e devono essere archiviati per dimostrare il mantenimento nel tempo della conformità del software e tenere sotto controllo l'andamento del livello di sicurezza dell'apparecchio stesso.

I controlli tecnici devono essere effettuati e documentati:

- a seguito della prima messa in servizio (installazione),
- dopo gli interventi di riparazione o manutenzione,
- nel corso delle verifiche periodiche.

## REGOLAZIONI

| REGOLAZIONI                        |                                     |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Attività                           | Frequenza                           | Chi la effettua ? | Note/riferimenti |
| Spegnere e riaccendere il software | Fine sessione giornaliera di lavoro | Cliente           |                  |
| Spegnere e riaccendere il sensore  | Alla fine di ogni sessione          | Cliente           |                  |

## MANUTENZIONE PROGRAMMATA

| MANUTENZIONE PROGRAMMATA      |                  |                   |                  |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Attività                      | Frequenza        | Chi la effettua ? | Note/riferimenti |
| Verifica del sensore          | Ad ogni utilizzo | Cliente           |                  |
| Verifiche funzionali generali | Ad ogni utilizzo | Cliente           |                  |


## VERIFICHE FUNZIONALI E DI SICUREZZA

- dopo gli interventi di riparazione o manutenzione,
- nel corso delle verifiche periodiche.

N.B. È consentito l'utilizzo del fHIT soltanto se tutti i controlli di sicurezza hanno avuto esito positivo.

## SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO A FINE VITA

Direttive europee 2002/96/CE e 2003/108/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

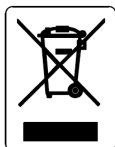

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI PER L'ITALIA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Nel caso di utenti professionali (aziende o enti), ai sensi della normativa sopra citata, la raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita:

- a) direttamente dall'utente, nel caso in cui questo decida di disfarsi dell'apparecchiatura senza sostituirla con una apparecchiatura nuova equivalente ed adibita alle stesse funzioni;
- b) dal produttore, inteso come il soggetto che ha per primo introdotto e commercializzato in Italia o rivende in Italia col proprio marchio l'apparecchiatura nuova che ha sostituito la precedente, nel caso in cui, contestualmente alla decisione di disfarsi dell'apparecchiatura a fine vita, l'utente effettui un acquisto di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni. In tale ultimo caso, l'utente potrà richiedere al produttore il ritiro della presente apparecchiatura entro e non oltre 15 giorni naturali consecutivi dalla consegna della suddetta apparecchiatura nuova.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

**SCHEDA SEGNALAZIONE INCIDENTI ALLE PERSONE**

In base alle direttive inviare questa scheda di segnalazione in caso di qualsiasi problema o incidente o segnalazione non considerata in questo manuale.

NOME CLIENTE: .....

INDIRIZZO: .....

DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE

DANNI ALLA SALUTE DELL'UTILIZZATORE

Data  
Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA (ASSICURAZIONE QUALITÀ)

CAUSA POSSIBILE DELL'INCIDENTE:

Disfunzione

Deterioramento delle caratteristiche e/o prestazioni

Carenza delle istruzioni per l'uso

Altro

GRAVITÀ DEL DANNO

DECISIONI OPERATIVE PROPOSTE

Data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'AZIENDA (DIREZIONE GENERALE)

DECISIONI OPERATIVE

AZIONI CORRETTIVE

Data

Firma

In caso di incidente spedire il modulo a BEON SOLUTIONS con la massima sollecitudine al indirizzo:

**beon Solutions Srl**

**Via bertoneria 16D**

**CAP 31059 Zero Branco (Italy)**